

Инструкция по настройке пульта медсестры iBells 8800

Настройка календаря

- 1) В режиме ожидания, нажмите клавишу [FUN], пока цифры не начнут мигать.
- 2) Нажмите клавишу [MOVE], чтобы выбрать дату.
- 3) Нажмите клавишу [UP] или [DOWN], чтобы выбрать нужную дату.
- 4) Для завершения настройки нажмите кнопку [FUN] в режиме ожидания.

Регистрация вызывающих устройств

- 1) в режиме ожидания, нажмите клавишу [FUN] и удерживайте 3 секунды пока [F1] не появится на экране.
- 2) Нажмите клавишу [ENT], [001 ---] появляется (первый номер), нажмите клавишу [UP], [DOWN], чтобы выбрать другой номер (доступно 300 вариантов номеров в одном регистре).
Следующие номера должны быть зарегистрированы в виде [002 ---] после регистрации [001 ---] и так далее.
- 3) Нажмите [ENT] снова, и появится [001-01]. Нажмите клавишу [UP], [[MOVE]] или [DOWN], чтобы выбрать регистрационный номер.
- 4) Нажмите кнопку вызова, чтобы зарегистрироваться, номер замигает на экране, зазвучит мелодия
- 5) Нажмите кнопку [ESC], чтобы на дисплее появилась [F1].
- 6) Далее нажмите клавишу [ESC], чтобы снова вернуться в режим ожидания.
Регистрация закончена.
- 7) Повторите шаг 2) ~ шаг 4), чтобы зарегистрировать все кнопки вызова, а затем нажмите клавишу [ESC] дважды в режиме ожидания. Регистрация всех кнопок завершена.



Москва

107113, ул. Маленковская, д. 32, строение 3, офис 112, 1 этаж
Тел. +7 (495) 120-60-10

Новосибирск

630083, ул. Большевистская, д. 131, оф. 214
Тел. +7 (383) 383-01-10

Барнаул

656037, пр. Ленина, д. 154а, корп. 7, офис 205
Тел. +7 (3852) 59-01-99

Новокузнецк

654007, ул. Павловского, д. 11а, офис 512
Тел. +7 (3843) 99-37-71